



EsCombine MORE® KIDS

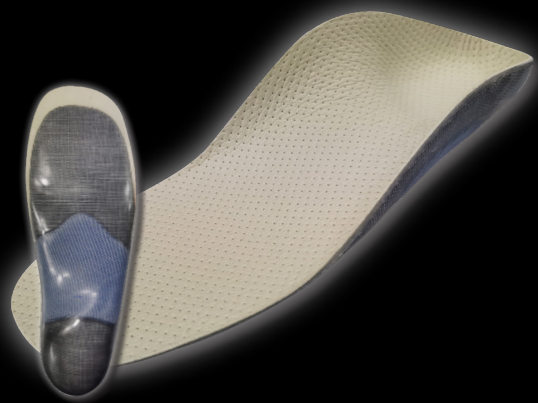

EsCombine MORE® KIDS
 Härtegrad 1, mittelbreit, langsohlig,
 Decke onSteam cream anperforiert
 Artikel-Nummer 119722-10000
 Größen 19/20-33/34
 35-48

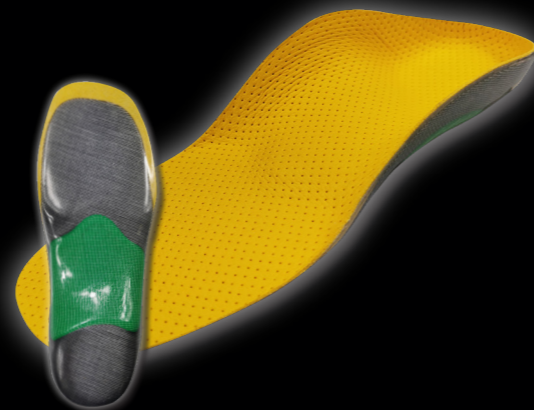


EsCombine MORE® KIDS
 Härtegrad 2, mittelbreit, langsohlig,
 Decke onSteam gelb anperforiert
 Artikel-Nummer 129722-10000
 Größen 19/20-33/34
 35-48

EsCombine MORE® CORE



EsCombine MORE® KIDS
 Härtegrad 3, mittelbreit, langsohlig,
 Decke onSteam hellgelb anperforiert
 Artikel-Nummer 139722-10000
 Größen 19/20-33/34
 35-48

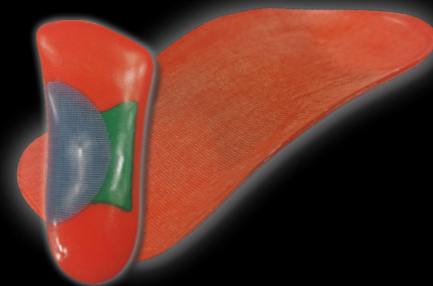

EsCombine MORE® CORE
 Unterbau sehr hart, mittelbreit, kurz
 Artikel-Nummer 172321-10000
 Größen 35-48

EsCombine MORE®

AUS DER MANUFAKTUR ESCO



DIE NR.1 DER ORTHOPÄDISCHEN
 EINLAGENVERSORGUNG

Vielseitigkeit

Hohe Patientenzufriedenheit

Individualität

Modernes Design

Variantenreichtum

Innovativer Materialmix

Zeitgemäße Technologie

Moderne Verarbeitungstechnik

Höchste Qualität

Unübertroffener Komfort

Federleichtes Gehgefühl

Rückkehr zum natürlichen Gang



EsCombine MORE®

Lassen Sie sich von unseren Premium-Produkten begeistern!

Mit der neuen Einlagentechnik EsCombine MORE® erhalten Sie eine moderne Einlagenversorgung, die es Ihnen ermöglicht, auf die komplexen Anforderungen der Fußorthopädie einzugehen.

In einem, mit Ihnen abgestimmten Aggregatzustand Ihrer Einlagenrohlinge, wird es Ihnen sehr leicht möglich, die individuelle Patientenversorgung indikationsbezogen, verbunden mit einem hohen Kosten/Nutzen, umzusetzen.

Härtegrade EsCombine MORE®

HÄRTEGRAD 0
Standard



HÄRTEGRAD 2
mit Verstärkung grün



HÄRTEGRAD 1
mit Verstärkung blau



HÄRTEGRAD 3
mit Verstärkung rot



Verarbeitungshinweise EsCombine MORE®



Einfache Nachverformung

EsCombine MORE®-Rohlinge ermöglichen eine individuelle und leichte Nachverformung. Hierzu genügt ein Wärmeofen mit einer Temperatur von 90-100°C und ein Vakuum-Tiefziehgerät oder eine Vakutherm-Anlage.



Individuelle Anpassung

EsCombine MORE®-Rohlinge sind sehr dünn und leicht, ein nicht zu unterschätzender Vorteil bei der Anpassung an die meisten Konfektionsschuhe. Der Vorfußbereich kann problemlos mit einer Schere beschnitten werden.




Ebenso können die EsCombine MORE®-Rohlinge mittels eines Heißluftföns punktuell nachbearbeitet werden. Auch beim Heißluftfön gilt: Niedrig-Thermoplast mit moderaten Temperaturen bearbeiten.




Schleifbarkeit

EsCombine MORE®-Rohlinge sind einfach zu schleifen. Die besten Ergebnisse werden mit Schleifbändern der Körnung 80-100 erreicht.

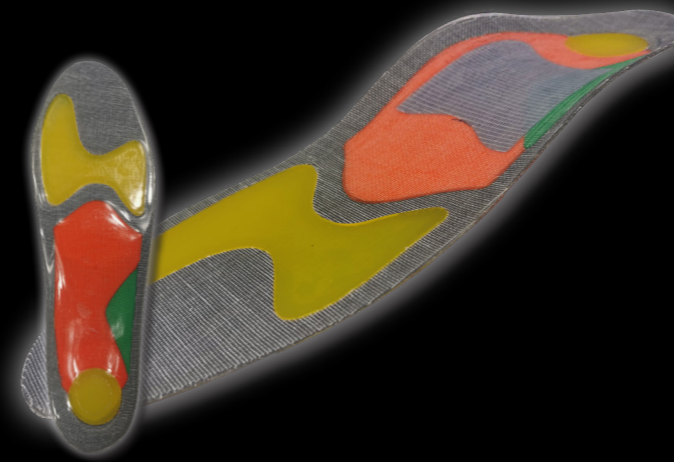


EsCombine MORE®

Härtegrad 0, mittelbreit, langsohlig
Artikel-Nummer 106022-10000
Größen 35-48

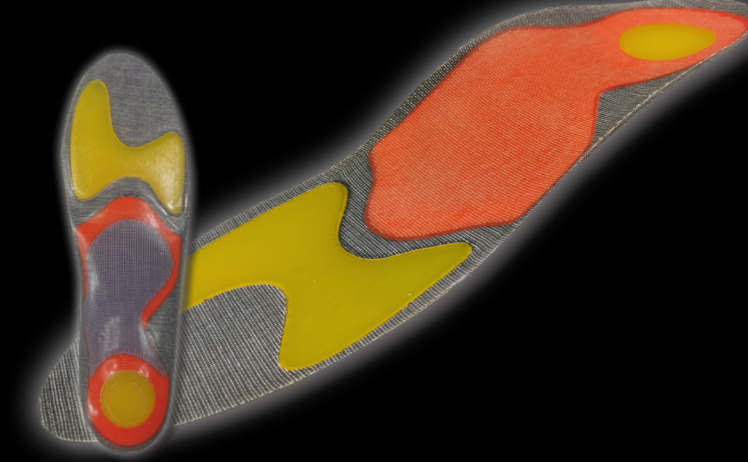


EsCombine MORE®

Härtegrad 1, mittelbreit, langsohlig
Artikel-Nummer 116022-10000
Größen 35-48

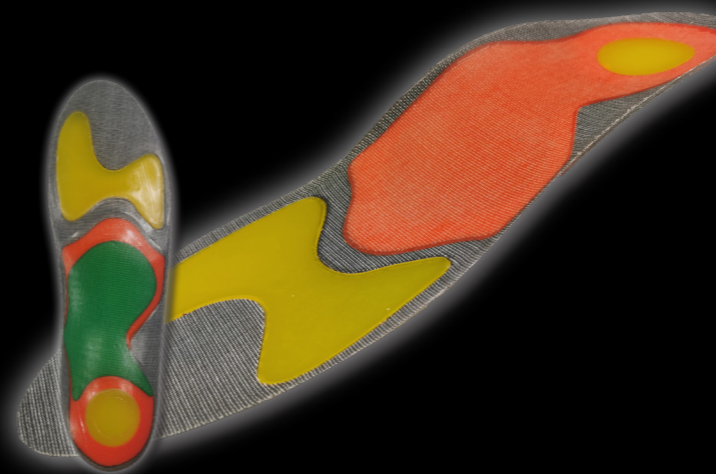

EsCombine MORE®

Härtegrad 2, mittelbreit, langsohlig
Artikel-Nummer 126022-10000
Größen 35-48

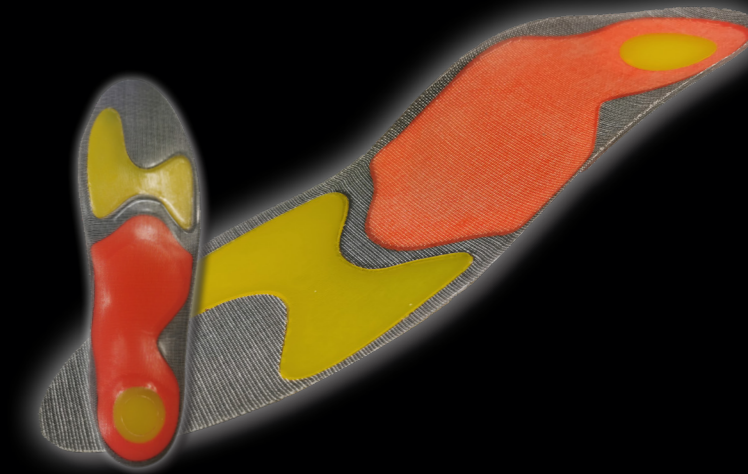

EsCombine MORE®

Härtegrad 3, mittelbreit, langsohlig
Artikel-Nummer 136022-10000
Größen 35-48